

## Бандаж послеоперационный на грудную клетку (мужской) T-1339

### Описание:

- изготовлен из эластичного влагопитывающего полотна с высоким содержанием хлопка, исключающего появление аллергических реакций
- послеоперационный бандаж имеет анатомическую форму, позволяющую оптимально разместить бандаж на грудной клетке мужчины, снабжен наплечными лямками для надежной фиксации бандажа на грудной клетке
- специальная вязка полотна обеспечивает отведение влаги с поверхности тела

### Функции послеоперационного бандажа:

- обеспечение эластичной фиксации грудной клетки
- уменьшение болей в области травмы, послеоперационной раны или рубца, в том числе болей при дыхании
- оптимальные условия для заживления послеоперационной раны и формирования послеоперационных рубцов

### Показания к применению послеоперационного бандажа:

- тупые и острые травмы грудной клетки
- после операций на грудной клетке
- межреберные невралгии и миозиты различной степени и локализации
- профилактика перенапряжения мышц при физической нагрузке в послеоперационном периоде

### Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- синдром портальной гипертензии
- наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие

Применять послеоперационный бандаж по назначению и под контролем врача.

### Инструкция по применению:

- одеть бандаж на нижнее белье или непосредственно на тело лежа на спине под контролем врача
- зафиксировать застежку послеоперационного пояса в зависимости от места расположения послеоперационного шва
- степень фиксации и длительность ношения определяются лечащим врачом

При возникновении вопросов по применению бандажа после операции обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования послеоперационного бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

### Рекомендации по уходу:

- перед стиркой застегнуть все застежки
- рекомендована ручная стирка при температуре 30° С, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку
- после стирки тщательно прополоскать послеоперационный бандаж
- не тереть и не выжимать изделие

- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей

#### Состав:

---

- хлопок – 53%
- полиэстер – 31%
- эластан – 16%

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Срок хранения 5 лет.